

O Kit SGL GUIDE Singular Implants é destinado a procedimentos especializados. Somente deverá ser utilizado por profissionais com treinamento específico em implantodontia. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e procedimentos poderá conduzir a resultados insatisfatórios.

1. DESCRIÇÃO

O Kit SGL GUIDE Singular Implants contém:

CÓDIGO	ITENS
160.001	SGL GUIDE -7
160.002	SGL GUIDE - 8
160.003	SGL GUIDE - 9
160.004	SGL GUIDE - 10
160.005	SGL GUIDE - 11,5
160.006	SGL GUIDE - 13
160.007	SGL GUIDE - 15
160.008	SGL GUIDE - 16
160.009	SGL GUIDE - 17
300.536	FRASCO CRISTAL 80 mL p/ SGL GUIDE

2. INDICAÇÃO DE USO

O produto é indicado para auxiliar na perfuração cirúrgica de implantes dentários, atuando como referência para a perfuração na altura desejada pelo profissional dentista.

3. APLICAÇÃO

O Kit SGL GUIDE Singular Implants possui forma côncava interna em formato de cilindro para encaixe no contra ângulo e as brocas para perfuração cirúrgica normalmente, desta forma, limitam a profundidade de inserção das brocas no leito cirúrgico, quando é encontrado o leito ósseo.

O estojo acondiciona os instrumentais protéticos e promove a organização durante os procedimentos odontológicos.

4. CONTRAINDICAÇÃO

Este produto não apresenta contraindicação, desde que usado por profissional qualificado e nas finalidades indicadas.

5. CONDIÇÃO DE MANIPULAÇÃO

Antes de iniciar a utilização, verificar as condições de limpeza e inviolabilidade do produto. Atentar para as instruções de uso antes de proceder as operações necessárias. Não realizar adaptações para o uso do Kit SGL GUIDE Singular Implants.

6. HIGIENIZAÇÃO

Os componentes do Kit SGL GUIDE Singular Implants deverão ser higienizados corretamente antes e após cada utilização, não devendo estar em contato prolongado com a umidade.

6.1 Limpeza

1. Desmontar a peça, se aplicável;
2. Imergir totalmente a peça em detergente enzimático solução a 10%;
3. Submeter os componentes a ciclo de limpeza em lavadora ultrassônica por, aproximadamente, 10 minutos;
4. Enxaguar com água destilada até retirar completamente os resíduos da solução;
5. Secar com pano macio, limpo e seco;
6. Realizar inspeção visual para verificação do processo de limpeza. Caso seja observada a presença de resíduos, repetir o procedimento. Pode ser utilizada uma escova limpa e macia para remover as impurezas antes de refazer o ciclo de lavagem;
7. Selecionar a embalagem de acordo com o processo de esterilização. Preferencialmente papel grau cirúrgico.

ATENÇÃO: Não utilizar produtos desincrustantes, pois tendem a escurecer as peças e provocar oxidação. O uso de líquido enzimático em uma concentração superior a 10%, assim como a secagem de peças contendo resíduos da solução de limpeza, favorecem a oxidação e devem ser evitados. A secagem das peças é de extrema importância antes do armazenamento e esterilização, pois o acúmulo de umidade nos produtos é prejudicial.

7. ESTERILIZAÇÃO

O Kit SGL GUIDE Singular Implants deve ser esterilizado através da autoclave, antes da utilização, após realizar o processo de limpeza. Execute esse processo na véspera ou no dia do procedimento. É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física (vapor saturado):

CICLO	TEMPERATURA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO*
Gravidade	132°C	30 min
Alto vácuo	134°C	9 min

* O tempo de exposição só deverá ser marcado quando a câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

8. ADVERTÊNCIAS

- Produto não estéril. Esterilizar antes do uso;
- Produto reutilizável;
- Antes de usar os instrumentais, leia atentamente as instruções;
- Não use os instrumentos sem possuir treinamento ou conhecimento do uso dos instrumentos protéticos;
- Não utilize instrumentais danificados;
- Garantir que os instrumentais não sejam engolidos pelo paciente;
- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada;
- Antes de cada etapa, verificar o perfeito encaixe entre os componentes.

9. EFEITOS ADVERSOS

Este produto não apresenta efeitos adversos desde que sejam respeitadas as orientações desta instrução de uso.

10. CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Os cuidados pós-operatórios são de responsabilidade do profissional. Orientar o paciente sobre a necessidade de realizar acompanhamento, adequada higiene oral e prescrição de medicamentos, se aplicável, após o procedimento cirúrgico.

11. CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado em local limpo, seco e protegido da radiação solar direta.

12. PRAZO DE VALIDADE


Indeterminado.

13. DESCARTE DE MATERIAIS

Antes de realizar o descarte do produto, deve-se consultar e cumprir a legislação vigente. Caso não haja, realize o descarte em lixo hospitalar.

14. SÍMBOLOS

A tabela a seguir apresenta os símbolos que podem estar contidos na rotulagem do produto. Por favor, verifique no rótulo quais são aplicáveis.

SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	Produto de uso único. Proibido reutilizar
	Consultar as instruções de uso
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Número de catálogo
	Código do lote
	Tamanho do produto
	Material de fabricação do produto
	Esterilizado com irradiação
	Fabricante
	Data de fabricação
	Data de validade
	Limites de temperatura para armazenamento e transporte
	Limites de umidade relativa do ar para armazenamento e transporte
	Conserve seco
	Frágil
	Proteger de luz solar
	Não estéril
	Dispositivo médico